

Probengewinnung und Versand des Untersuchungsmaterials

Gewinnung des Probenmaterials:

1. Für die Untersuchungen werden **ca. 2-3 ml Serum** benötigt
2. Das gewonnene Vollblut im Serumröhrchen 30-60 min. bei Raumtemperatur stehen lassen, anschließend 10 min. bei 3000 rpm zentrifugieren und das gewonnene Serum in die von uns bereitgestellten Serumröhrchen umfüllen
3. Bitte unsere Serumröhrchen beschriften mit:
 - a. Name, Vorname,
 - b. Geburtsdatum des Patienten
4. Probenlagerung bis zum Versand bei 2-8 C° im Kühlschrank
5. Das Untersuchungsmaterial wird bei uns im Labor ca. 3 Wochen für evtl. Nachforderungen aufbewahrt

Handhabung des Anforderungsbogens:

1. **Patientendaten** bitte vollständig ausfüllen, Einzug des Anforderungsbogens in den Nadeldrucker ist möglich. Bei Einsendungen von **Kliniken und Krankenhäusern**: Bitte angeben, ob der Patient **stationär** oder **ambulant**, GKV- oder Privat / Selbstzahler ist. Bei Selbstzahlern ist die **Anschrift des Patienten** für die Rechnung wichtig.
2. Bitte das **Datum der Blutentnahme** eintragen und die angeforderten **Untersuchungen ankreuzen**
3. Evtl. Verdachtsdiagnose oder klinische Angaben notieren
4. **Bei GKV Versicherten: Unbedingt Labor-Überweisungsschein Muster 10** beifügen

Materialbestellung für den Versand

Unser Labor stellt den Einsendern, wie es in den Richtlinien des EBM und der GOÄ vorgesehen ist, das Versandmaterial für die Einsendung von Blutproben zur Verfügung. Sie erhalten von uns dabei das komplette Versand-Set mit dem Hinweis: "Porto zahlt Empfänger" .(Genauere Information zu den Bedingungen des Postversands dazu unter dem Formular-Download: "Probenversand Deutsche Post")

Versandmaterial kann für Sie als Einsender bei uns kostenfrei per **Telefon, Fax oder über die o.a. Internetseite** (siehe Formular-Download "Bestellung Versandmaterial") angefordert werden.

Ein Versand-Set enthält:

1. **Untersuchungs-Bögen** mit dem von uns angebotenen Untersuchungsspektrum
2. **Serumröhrchen** (Fa. Sarstedt Best. Nr. 62.610.201, Länge 92mm, Ø 15,3 mm)
3. **Versandflaschen** (Fa. Sarstedt Best. Nr. 78.573, Innenlänge 118mm, Ø 23mm, mit Innenfilzeinlage)
4. **Für Sie portofreie Versandkartons** (T-Box für den Post-Versand gültig nach den Regelungen der Deutschen Post und Verpackungsvorschriften P650; Fa. Sarstedt Best. Nr. 95.900 passend für 1-2 Versandgefäße, 198x107x38mm)
5. **1 Anforderungsbogen für neues Versandmaterial** (Anforderung per Tel., Fax oder Post)

Versandbedigungen der Deutschen Post für Blutproben

Unser Labor stellt Ihnen, wie es in den Richtlinien des EBM und der GOÄ vorgesehen ist, das Versandmaterial für die Einsendung von Blutproben zur Verfügung. Das Versandmaterial entspricht den Bestimmungen der Deutschen Post zum Versand medizinischer Proben.

Die von uns aufgeklebten Etiketten dürfen **nicht handschriftlich** verändert werden, da sonst die Automatenlesbarkeit nicht mehr gegeben ist und deshalb eine erhöhte Beförderungsgebühr fällig wird.

Die Boxen tragen den Hinweis: **Entgelt zahlt Empfänger, d.h. eine Frankierung durch den Einsender ist nicht erforderlich.**

Versand der Proben:

1. Die Deutsche Post erlaubt für den Versand **nur Plastikröhrchen** (keine Glasröhrchen) mit Schraubverschluss (keine Gummistopfen, keine Monovetten), die in einer **Versandflasche mit Fließpapiereinlage** und **Schraubverschluss** verpackt sind.
2. Eines oder mehrere dieser umhüllten Röhrchen sind in einer festen Falttaschenverpackung (P 650, UN-Nr. 3373) oder in einem Luftpolster Umschlag zu versenden.
3. Die verpackte Serumprobe ist ein **normaler Maxi – Brief**. Er trägt auf der Versandbox den von unserem Labor nach Maßgaben der Transportvorschriften der Deutschen Post eingedruckten Vermerk: "**Gebühr zahlt Empfänger**", sodass **keine Frankierung** von Ihnen als Einsender erforderlich ist.
 - Falls Einsender selbst frankieren möchten: das Porto beträgt zur Zeit 2,75 €
 - Es sind **keine Päckchen und keine Pakete**, deshalb ist auch **keine** Frankierung als Päckchen/Paket nötig.
 - **Keine Express-Zustellung nötig**, da die Proben in der Regel am Tag nach dem Versand unser Labor erreichen. Die Expresszustellung kostet 13 €, die wir dem Einsender in Rechnung stellen müssen.
 - **Absenderangabe mit Telefonnummer Pflicht**: Falls eine Probe zu Bruch geht, will die Post mit dem Absender möglichst schnell Kontakt aufnehmen können, um eine Gefährdung durch das Probenmaterial auszuschließen.