

Probengewinnung und Versand des Untersuchungsmaterials

Gewinnung des Probenmaterials:

1. Für die Untersuchungen werden **ca. 2-3 ml Serum** benötigt
2. Das gewonnene Vollblut im Serumröhrchen 30-60 min. bei Raumtemperatur stehen lassen, anschließend 10 min. bei 3000 rpm zentrifugieren und das gewonnene Serum in die von uns bereitgestellten Serumröhrchen umfüllen
3. Bitte unsere Serumröhrchen beschriften mit:
 - a. Name, Vorname,
 - b. Geburtsdatum des Patienten
4. Probenlagerung bis zum Versand bei 2-8 C° im Kühlschrank
5. Das Untersuchungsmaterial wird bei uns im Labor ca. 3 Wochen für evtl. Nachforderungen aufbewahrt

Handhabung des Anforderungsbogens:

1. **Patientendaten** bitte vollständig ausfüllen, Einzug des Anforderungsbogens in den Nadeldrucker ist möglich. Bei Einsendungen von **Kliniken und Krankenhäusern**: Bitte angeben, ob der Patient **stationär** oder **ambulant**, GKV- oder Privat / Selbstzahler ist. Bei Selbstzahlern ist die **Anschrift des Patienten** für die Rechnung wichtig.
2. Bitte das **Datum der Blutentnahme** eintragen und die angeforderten **Untersuchungen ankreuzen**
3. Evtl. Verdachtsdiagnose oder klinische Angaben notieren
4. **Bei GKV Versicherten: Unbedingt Labor-Überweisungsschein Muster 10** beifügen

Materialbestellung für den Versand

Unser Labor stellt den Einsendern, wie es in den Richtlinien des EBM und der GOÄ vorgesehen ist, das Versandmaterial für die Einsendung von Blutproben zur Verfügung. Sie erhalten von uns dabei das komplette Versand-Set mit dem Hinweis: "Porto zahlt Empfänger" .(Genauere Information zu den Bedingungen des Postversands dazu unter dem Formular-Download: "Probenversand Deutsche Post")
Versandmaterial kann für Sie als Einsender bei uns kostenfrei per **Telefon, Fax oder über die o.a. Internetseite** (siehe Formular-Download "Bestellung Versandmaterial") angefordert werden.

Ein Versand-Set enthält:

1. **Untersuchungs-Bögen** mit dem von uns angebotenen Untersuchungsspektrum
2. **Serumröhrchen** (Fa. Sarstedt Best. Nr. 55.468, Länge 95mm, Ø 16,8 mm)
3. **Versandflaschen** (Fa. Sarstedt Best. Nr. 78.587, Innenlänge 118mm, Ø 23mm, mit Innenfilzeinlage)
4. **Für Sie portofreie Versandkartons** (T-Box für den Post-Versand gültig nach den Regelungen der Deutschen Post und Verpackungsvorschriften P650; Fa. Sarstedt Best. Nr. 95.901 passend für 1-2 Versandgefäße, 198x107x38mm)
5. **1 Anforderungsbogen für neues Versandmaterial** (Anforderung per Tel., Fax oder Post)